



FKG
swiss endo

RACE® EVO



**THE
RACE
LEGACY**

SEGURO. EFICIENTE. CONTROL SUAVE.

www.fkg.ch/race-evo

Un Legado que Evolucionara a Mejor


RACE® EVO es la última evolución de nuestro famoso y comprobado sistema rotatorio RaCe. A la gran fiabilidad y características genuinas de Race, se le suma un exclusivo tratamiento térmico patentado y una mayor capacidad de velocidad de rotación, permitiendo que los nuevos instrumentos **RACE® EVO** sean todavía más seguros, fáciles de controlar y más eficientes que nunca.




* FKG recomienda usar los instrumentos RACE® EVO a 1.000 rpm.

Su Enfoque. Su Elección

RACE® EVO le permite elegir su enfoque terapéutico. Con nuestra completa gama de instrumentos, podrá tratar con éxito los diversos sistemas radiculares. Sólo tiene que empezar con la secuencia de instrumentos básica e ir ensanchando gradualmente el tamaño del conducto cuanto sea necesario.

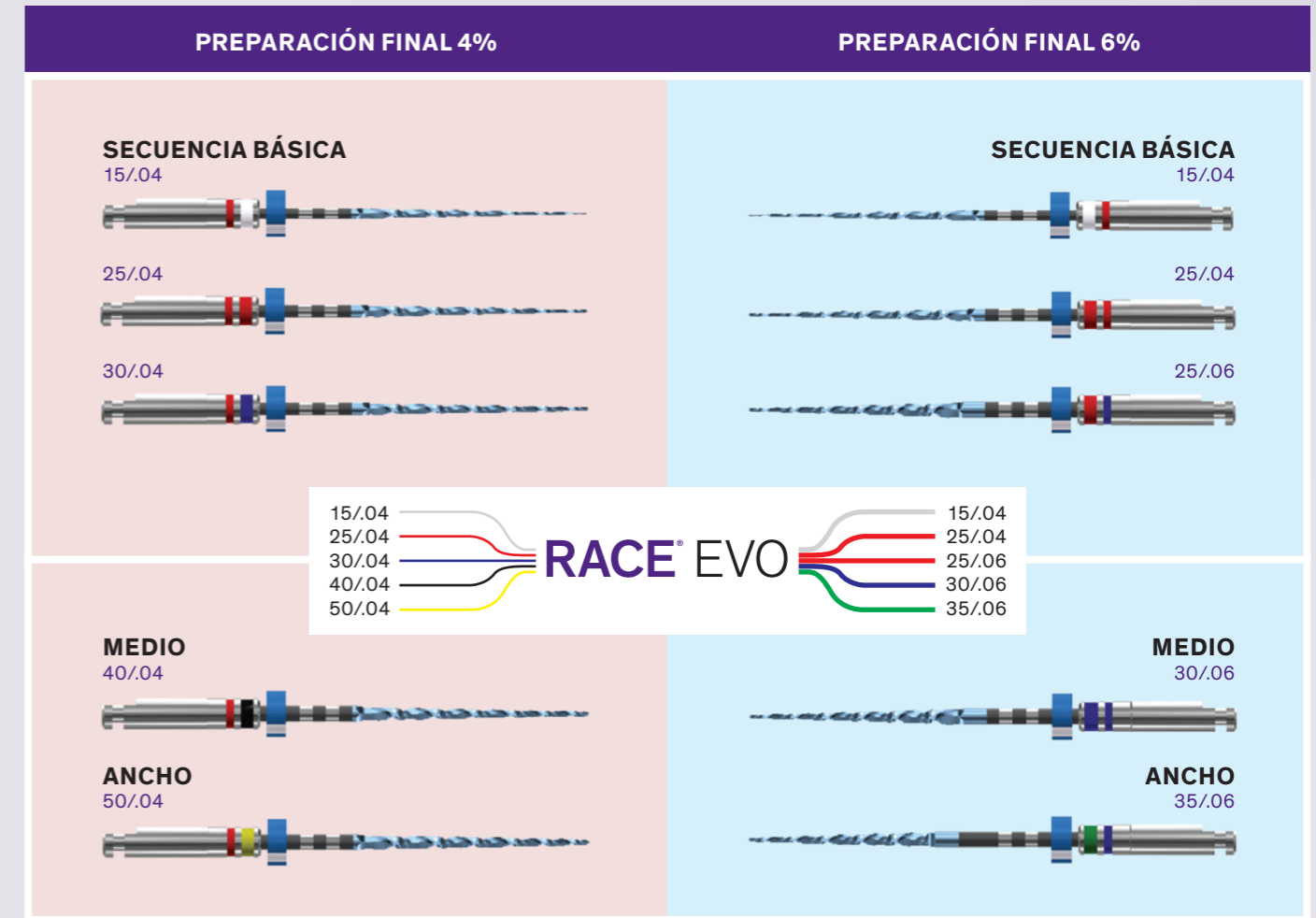

SECUENCIA PARA LA MAYORÍA DE CASOS

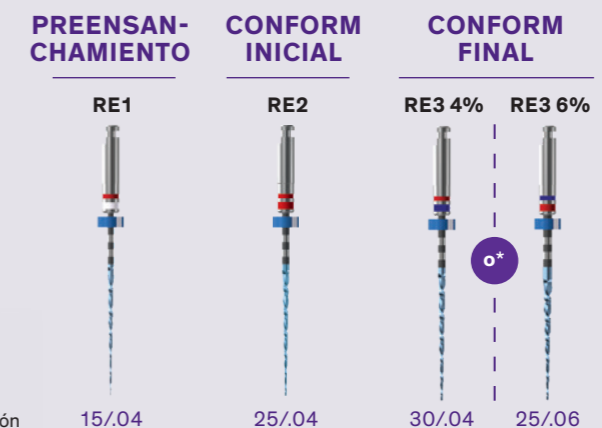

* Seleccione el instrumento de conformación en función de su enfoque terapéutico.

Un Nuevo Nivel de Flexibilidad y Confianza

El diseño de **RACE® EVO** conserva las mismas características que los instrumentos RaCe pero ofrece una mayor flexibilidad. El exclusivo tratamiento térmico al que se somete, reconocible por el color azul del instrumento, multiplica 1,4 veces la flexibilidad de RaCe y ofrece un mayor rendimiento y un avance más suave.



Inicial



Final

© Andreas Krokidis (Grecia), todos los derechos reservados

FLEXIBILIDAD
x 1,4*

Mayor Resistencia a la Fatiga Cíclica

RACE® EVO ofrece una resistencia a la fatiga cíclica hasta 2,8 veces mayor que la de su predecesor RaCe. De esta manera se reduce el riesgo de rotura del instrumento y permite una mayor velocidad de rotación, mejorando así la seguridad y comodidad del paciente.

RESISTENCIA
x 2,8**




* Según resultados de laboratorios internos obtenidos con RACE® EVO 4%.

** Según resultados de laboratorios internos; tiempo hasta la fractura a la velocidad recomendada.

Eficiencia de Corte Mejorada


El diseño triangular de bordes afilados de **RACE® EVO**, junto con la mayor velocidad de rotación, ofrece una eficiencia de corte hasta 1,5 veces superior a la de RaCe.

EFICIENCIA
x 1,5*

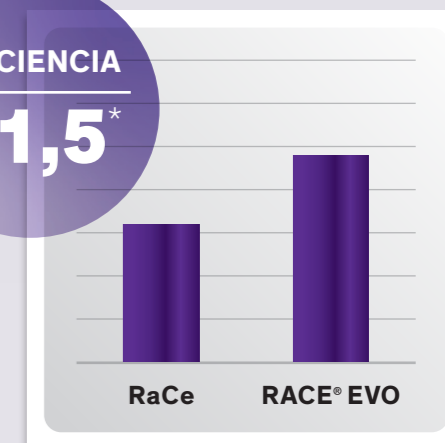

El Control Absoluto en sus manos desde hace más de 20 Años

Además de mejorar la flexibilidad, la resistencia a la fatiga cíclica y la capacidad de corte, los instrumentos **RACE® EVO** ofrecen la misma eficacia probada del diseño RaCe.

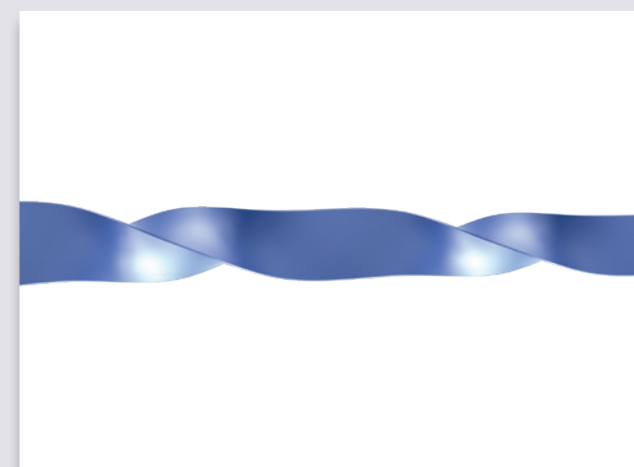

El exclusivo y patentado diseño de filos de cortes alternos reduce el efecto de atornillamiento, promoviendo un mejor control y progresión del instrumento dentro del conducto.



El especial diseño de la exclusiva punta de seguridad redondeada de RACE® EVO facilita el avance del instrumento a largo del conducto.

* Según resultados de laboratorios internos obtenidos con RACE® EVO 4%.

RACE® EVO

Ventajas del diseño RaCe, una vez sometido a tratamiento térmico y usado a mayor velocidad:



+ 40%*
de flexibilidad

x 2,8*
resistencia a la fatiga cíclica

+ 50%*
eficiencia de corte

* Según resultados de laboratorios internos comparados con RaCe®.

Referencias de los Productos

SECUENCIAS			
RACE EVO 4% sequence (3 files per blister)			
15/.04	21mm	S1.7B0.00.SCV.FK	}
25/.04	25mm	S1.7B0.00.SCW.FK	
30/.04	31mm	S1.7B0.00.SCX.FK	
RACE EVO 6% sequence (3 files per blister)			
15/.04	21mm	S1.7B0.00.SCY.FK	}
25/.04	25mm	S1.7B0.00.SCZ.FK	
25/.06	31mm	S1.7B0.00.SDA.FK	
REPOSICIONES			
RACE EVO 15/.04			
● ●	6x	21mm	S1.7B0.00.ODG.FK
	6x	25mm	S1.7B0.00.0FZ.FK
	6x	31mm	S1.7B0.00.0DH.FK
RACE EVO 25/.04			
● ●	6x	21mm	S1.7B0.00.0DI.FK
	6x	25mm	S1.7B0.00.0GB.FK
	6x	31mm	S1.7B0.00.0DJ.FK
RACE EVO 30/.04			
●	6x	21mm	S1.7B0.00.0DK.FK
	6x	25mm	S1.7B0.00.0GC.FK
	6x	31mm	S1.7B0.00.0DL.FK
RACE EVO 40/.04			
●	6x	21mm	S1.7B0.00.0DM.FK
	6x	25mm	S1.7B0.00.0GE.FK
	6x	31mm	S1.7B0.00.0DN.FK
RACE EVO 50/.04			
●	6x	21mm	S1.7B0.00.0DO.FK
	6x	25mm	S1.7B0.00.0GF.FK
	6x	31mm	S1.7B0.00.0DP.FK
RACE EVO 25/.06			
●	6x	21mm	S1.7B0.00.0DQ.FK
	6x	25mm	S1.7B0.00.0GH.FK
	6x	31mm	S1.7B0.00.0DU.FK
RACE EVO 30/.06			
●	6x	21mm	S1.7B0.00.0DV.FK
	6x	25mm	S1.7B0.00.0GI.FK
	6x	31mm	S1.7B0.00.0DW.FK
RACE EVO 35/.06			
●	6x	21mm	S1.7B0.00.0DX.FK
	6x	25mm	S1.7B0.00.0GJ.FK
	6x	31mm	S1.7B0.00.0GU.FK

● conicidad 4% ● conicidad 6%

PUNTAS DE PAPEL		
Caja de 200 puntas de papel		
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC
	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.06	08.610.06.030.BC
	35/.06	08.610.06.035.BC

GUTTA PERCHA		
Caja de 60 Gutta Percha		
	30/.04	08.600.04.030.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE
	25/.06	08.600.06.025.RE
	30/.06	08.600.06.030.RE
	35/.06	08.600.06.035.RE

TOTALFILL® BC POINTS™		
Caja de 60 BC Points		
	30/.04	08.650.04.030.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE
	25/.06	08.650.06.025.RE
	30/.06	08.650.06.030.RE
	35/.06	08.650.06.035.RE

TOTALFILL® BC SEALER™	
Jeringa de 2 g + 15 TotalFill BC Tips	
	08.650.00.007.XX

TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW		
Caja de 60 BC Points HiFlow		
	30/.04	08.650.04.030.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF

TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW	
Jeringa de 1,5 g + 15 TotalFill BC Tips	
	08.650.00.008.XX

www.fkg.ch/race-evo

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Switzerland
T +41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch

